

Cuvete UriSed

REF

URS-9961HU
URS-9961-1
URS-9971
URS-9972
URS-9974
URS-9961CH-1
URS-9971CH

Instrucțiuni de utilizare

Utilizare preconizată:

Cuvetele UriSed sunt recipiente disponibile de unică folosință, făcute din policarbonat, folosite pentru a analiza probele de urină umană și fluide corporale necentrifugate cu ajutorul analizoarelor de sedimente UriSed. Sunt destinate utilizării profesionale, de laborator. Sunt destinate utilizării pentru diagnostic in vitro.

Principiul de testare:

Cuvetele UriSed sunt recipiente pentru probe care permit analiza microscopică a probelor de urină.


Materiale furnizate:

600 de cuvete în 12 suporturi de cuvete cu 50 de cuvete fiecare

Materiale nefurnizate: Materials not provided:

- Analizor compatibil de sedimente urinare (UriSed, UriSed2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)
- Echipament general de laborator

Folosirea cuvetelor:

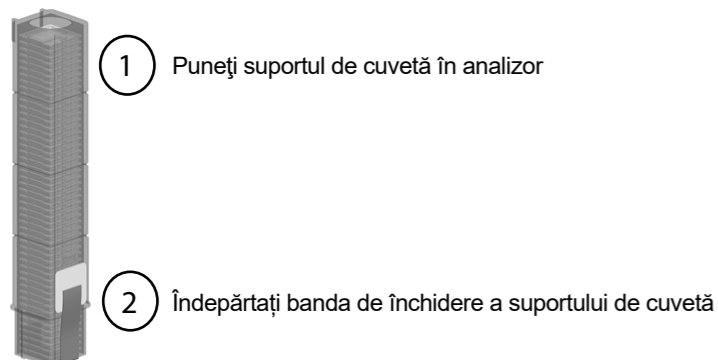


Condiții de mediu

Temperatura de depozitare	0 – 45°C
Temperatura de transport	-25°C – 60°C
Umiditate de transport	20 – 80 %
Condiții de funcționare	În funcția stării analizorului dvs.

Avertismente și atenționări




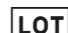











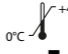


- Nu depozitați cuvetele în lumina directă a soarelui
- Nu îndepărtați banda de închidere de pe suportul de cuvetă înainte de a-l instala în analizor
- Nu îndepărtați suporturile de cuvete parțial pline din analizor
- Fiecare cuvetă este de unică folosință, nu efectuați niciodată un test cu o cuvetă folosită mai înainte
- Deoarece urina este un lichid de origine umană, aceasta poate fi infecțioasă și poate constitui un potențial risc biologic
- Manipulați cuvetele UriSed folosite și contaminanții de urină cu grijă
- Eliminați deșeurile în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de laborator acceptate.
- Contactați distribuitorul dvs. pentru a vă asigura că comandați cuvete compatibile cu analizorul dvs. specific
- Utilizați cuvele înaintea datei de expirare

 Consultați instrucțiunile de folosire ale analizorului dvs. pentru a primi detalii privind colectarea speciimenelor, eventualele etape de pregătire, calculul rezultatelor, caracteristicile analitice și de performanță, interferențele, limitările, procedurile de control al calității, avertismentele și atenționările specifice.

Raportarea incidentelor

Raportați reprezentantului de serviciu 77 Elektronika și autorității locale competente orice incident grav care ar putea apărea în timpul folosirii acestui produs.

Simboluri:

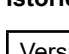	Identificatorul unic al dispozitivului
	Dispozitivul medical de diagnostic in vitro
	Numărul de catalog
	Numărul lotului
	Marca CE identifică faptul că produsul respectă directivele aplicabile ale Uniunii Europene
	Folosite de către
	Limitarea temperaturii
	Producător
	Păstrați departe de lumina soarelui
	Consultați instrucțiunile de folosire
	Limitare de umiditate
	Atenție
	Riscuri biologice
	600 Conținut suficient pentru 600 de teste
	NU refolosiți
	Nu folosiți dacă ambalajul este deteriorat
	Limba română
	Numărul lotului

Istoricul versiunii

Versiunea	Data	Modificări
3	2022.03.25	Actualizare privind conformitatea cu IVDR
2	2020.11.25	Actualizarea generală a conținutului
1	2009.02.17	Prima versiune

Producător:

77 Elektronika Kft.
98. Fehérvári út, 1116 Budapest
UNGARIA
www.en.e77.hu
sales@e77.hu
Tel: + 36 1 206 - 1480
Fax: + 36 1 206 - 1481