

# UriSed Kivete

REF

URS-9961HU  
URS-9961-1  
URS-9971  
URS-9972  
URS-9974  
URS-9961CH-1  
URS-9971CH

## Navodila za uporabo

### Predvidena uporaba:

Kivete UriSed so polikarbonatne posode za vzorce za enkratno uporabo, ki se uporabljajo za analizo ne centrifugiranih vzorcev človeškega urina z analizatorji sedimentov UriSed. Namenjene so za profesionalno, laboratorijsko uporabo. Namenjena je za in vitro diagnostično uporabo..

### Načelo testiranja:

Kivete UriSed so posode za vzorce, ki omogočajo mikroskopsko analizo vzorcev urina.


### Zagotovljeni materiali:

600 kivet in 12 držal za kivete, vsako za 50 kivet

### Materiali, ki niso zagotovljeni:

- Kompatibilen analizator urinskega sedimenta (UriSed, UriSed2, UriSed 3, UriSed 3 PRO, UriSed mini)
- Splošna laboratorijska oprema

### Uporaba kivet:

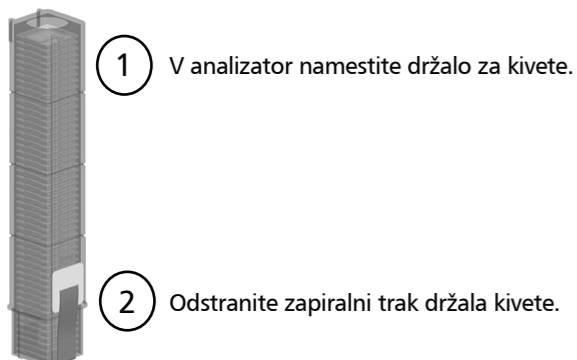


## Pogoji okoljevarstvenega vidika

Temperatura skladiščenja	0 – 45°C
Temperatura transporta	-25°C – 60°C
Para v transportu	20 – 80 %
Pogoji delovanja	V skladu s pogoji vašega analizatorja

### ⚠ Opozorila in previdnostni ukrepi




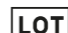










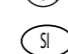


- Kivete ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi
- Pred namestitvijo v analizator z držala kivete ne odstranite zapiralnega traku.
- Delno polnih držal za kivete ne odstranjujte iz analizatorja
- Vsaka kiveta je za enkratno uporabo, nikoli ne izvajajte testa z že uporabljenim kivetom
- Ker je urin tekočina človeškega izvora, je lahko kužen in predstavlja potencialno biološko tveganje
- Z uporabljenimi kivetami UriSed in kontaminanti urina ravnajte previdno
- Odpadke odstranite v skladu s sprejetimi laboratorijskimi navodili in postopki.
- Obrnite se na distributerja, da se prepričate, ali ste naročili kivete, ki so združljive z vašim analizatorjem.
- Kivete uporabite preden rok preteče

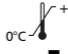 V navodilih za uporabo analizatorja preverite podrobnosti o zbiranju vzorca, morebitnih pripravljalnih korakih, izračunu rezultatov, analitičnih in zmogljivostnih značilnostih, motnjah, omejitvah, postopkih nadzora kakovosti ter posebnih opozorilih in svarilih.

### Poročanje incidentov

O vseh resnih incidentih, do katerih lahko pride pri uporabi tega izdelka, poročajte servisnemu predstavniku podjetja 77 Elektronika in lokalnemu pristojnemu organu.

## Simboli:

	Unikatni identifikator naprave
	In vitro medicinski pripomoček za diagnostiko
	Kataloška številka
	Proizvodna številka
	Znak CE označuje, da je izdelek skladen z veljavnimi direktivami Evropske unije
	Uporaba s strani
	Temperaturna omejitev
	Proizvajalec
	Hraniti oddaljeno od sončne svetlobe
	Pred uporabo preberite navodila
	Omejitev stopnje pare
	Pozor
	Biološka tveganja
	600 Vsebuje količino, ki je zadostna za 600 testov
	NE uporabljajte ponovno
	Ne uporabljajte izdelka če je embalaža poškodovana
	Slovenščina
	Serijska številka

## Zgodovina različic

Različica	Datum	Spremembe
3	2022.03.25	Posodobitev skladnosti z direktivo IVDR
2	2020.11.25	Splošna vsebinska posodobitev
1	2009.02.17	Prva izdaja

## Proizvajalec:

77 Elektronika Kft.  
98. Fehérvári út, 1116 Budapest  
HUNGARY  
www.en.e77.hu  
sales@e77.hu  
Tel: + 36 1 206 - 1480  
Faks: + 36 1 206 - 1481